

INSTRUCTIEPROTOCOL **MAATWERKZOOl KIT**

ONTVANGST

1. U ontvangt de volgende componenten:

- Ingeleeste schoenen (voor eigen afwerking)
- Concept: Maatwerkzool KIT
- Verlijmde blokken in de aangevraagde dikte
 - **Let op:** Het is **niet** toegestaan gaten in de blokken te boren voor gewichtsreductie (geldt enkel voor 4Allworks).
 - **Gebruik uitsluitend** de door Neskruid geleverde materialen voor deze order, met uitzondering van de te gebruiken lijmen (geldt enkel voor 4Allworks).
- Los meegeleverde loopzool
 - De loopzool is opgeruwd en gehalogeneerd; de optimale werking is binnen twee weken na ontvangst.



VERWERKING

2. Schuur de verlijmde blokken.

3. Prepareer de contactoppervlakken voor verlijming:

- Verwijder stof en ontvet de verlijmde blokken grondig (bijv. met Aceton).
- Halogeneer vervolgens de loopzool nog één keer.
 - **Belangrijk:** Houd rekening met de rusttijd na het halogeneren voor een optimale werking. Raadpleeg hiervoor de instructies op de verpakking van de halogeenprimer.

VERLIJMING VAN DE LOOPZOOl (VERPLICHT BIJ 4ALLWORKS)

4. Volg deze stappen om de loopzool te plaatsen:

- Breng een PU-voorstrijk met 5% verharder aan op beide contactoppervlakken.
- Laat de voorstrijk minimaal 15 minuten drogen.
- Breng PU-contactlijm/PUR-lijm met 5% verharder aan op beide contactoppervlakken.
- Laat de gelijmde delen 45-60 minuten drogen.
- Verwarm de verlijmde blokken en activeer de loopzool tot circa 80°C.
- Verbind beide contactoppervlakken binnen 20 seconden nauwkeurig.
- Plaats het geheel in een pers met een druk van minimaal 5 bar gedurende minimaal 15 seconden.

AFWERKING

5. Laat het schoeisel 24 uur afkoelen voor verdere verwerking.
6. Schuur het onderwerk rondom af met een scherpe schuurband om loslaten van de loopzool te voorkomen.

UITLEESTEN

7. Verwijder de leesten.

- Leest de schoenen uit, zoals gewoonlijk.
- Verwijder de siliconen onder de veiligheidsneus voorzichtig met de hand om beschadiging van de voering te voorkomen (geldt enkel voor 4Allworks).

ALGEMENE OPMERKINGEN

- De aangegeven droog- en verwarmingstijden zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid in uw werkruimte. Raadpleeg altijd de specifieke voorschriften van uw materiaalleverancier.
- **Let op:** Het aanleveren van ingeleeste schoenen kan de gebruikelijke kwaliteitscontrole beïnvloeden.
- Maatwerkzool KIT kan niet worden toegepast bij ESD-schoenen!
- Neskrid aanvaardt geen garantieclaims met betrekking tot de loopzool of de verlijming hiervan.