

# MÖGLICHKEITEN & VERFAHREN **SEMI-ORTHOPÄDISCHE LEISTEN** BERUFS- UND ARBEITSSICHERHEITSSCHUHEN

## **KATEGORIEN**

### ■ **Kategorie B (alle Leisten möglich)**

Semi-orthopädisches Schuhwerk, erhältlich in verschiedenen Leisten und Weiten, mit der Möglichkeit, Änderungen am Obermaterial, Futter, der Laufsohle (und Schuhspitzenschutz) vorzunehmen. Korklage unter Bettung (3/4) und modulare Anpassungen an den Leisten sind möglich (Fußbrücken, Vorfuß, Hallux, Digitus 5).

### ■ **Kategorie BI (alle Leisten möglich)**

Gleiches wie Kategorie B, jedoch produziert Neskrid die Schuheinlagen.

### ■ **Kategorie C (nur Standardleiste 66)**

Standard-Schuhwerk mit orthopädischen Zurichtungen. Das Modell, Obermaterial, Futter, Laufsohle und Schuhspitzenschutz können ausgewählt werden.

### ■ **Kategorie CI (nur Standardleiste 66)**

Gleiches wie Kategorie C, jedoch produziert Neskrid die Schuheinlagen.

## **LEISTEN**

Abhängig von der erforderlichen Kategorie, bieten wir die folgenden 5 Standardleisten an:

### ■ **Leiste 66 Standardleiste**

Größe 35 bis 52

Erhältlich in 5 Weiten (8-9-10-11-12)

Dies ist die breiteste Leiste (Ballenweite)

Bietet 3,5 mm Platz für Schuheinlagen, einschließlich des Bezugsmaterials unter der Zehenschutzkappe

### ■ **Leiste 77 Semi-orthopädisch**

Größe 38 bis 48

Erhältlich in 2 Weiten (10-13)

Diese Leiste ist 6 mm höher, was den Platz für Schuheinlagen unter der Zehenschutzkappe erhöht

Wird auch für Diabetiker verwendet, die stärkere Schuheinlagen benötigen

Ermöglicht 9 mm Platz unter der Zehenschutzkappe; kann als Bruttoleiste betrachtet werden (Leisten mit Platz für Schuheinlage inklusive)

### ■ **Leiste 88 Orthopädisch Typ B**

Entwickelt für Diabetiker

Größe 38 bis 48

Erhältlich in 1 Weite (12)

Höchste Zehenschutzkappenhöhe im Angebot

Ermöglicht 9 mm Platz unter der Zehenschutzkappe; kann als Bruttoleiste betrachtet werden (Leisten mit Platz für Schuheinlage inklusive)

### ■ **Leiste 517 Office**

Office Schuhleiste für die Modelle Ituha (niedrig) und Manso (hoch)

Größe 38-50

Erhältlich in 2 Weiten (9-10)

Nur mit Office-Formsohle möglich


Ermöglicht 2,3 mm Platz unter der Zehenschutzkappe

### ■ Leiste 700 (Damenleiste)


Passend für die Modellen Haida, Maya, Yana und Yuma  
Größe 33-42  
Erhältlich in 2 Weiten (6-7)  
Nur mit Formsohle Damen schwarz möglich  
Ermöglicht 2,3 mm Platz unter der Zehenschutzkappe

## **ANWEISUNGEN/RICHTLINIEN ZUR BESTIMMUNG DER PASSENDEN LEISTE FÜR DEN ENDVERBRAUCHER**

1. Nehmen Sie die Fußmaße Ihres Kunden und wählen Sie die am besten passende Leiste aus. Bitte addieren Sie 12 mm zur Fußlänge, bevor Sie die Leistengröße auswählen. Beginnen Sie mit der Länge und gehen Sie dann zur Ballenweite und zum Umfang über. Durch das Hinzufügen modularer Anpassungen können Sie zusätzlichen Platz schaffen.
2. Verwenden Sie die 66-Brandsohlenschablonen, um festzustellen, ob der Entwurf mit der Leiste (Größe) übereinstimmt. Dieses Schabloon zeigt Ihnen auch das Design an der Vorderseite, wo das Zehenschutzkappedesign implementiert ist: Unsere Leisten sind mit dem Zehenschutzkappenausschnitt gestaltet.
3. Die Änderung der Standard-Schaftobermaterialhöhe führt zu einem maßgefertigten Schaftobermaterial und wird extra berechnet.
4. Maßgefertigte Laufsohlen sind möglich, aber nur für Tintenlöscherrolle, extremes Abrollen und ausgestelltter Absatz sowie für das Asphaltsohlenmodell erforderlich.
5. Ein Korklage unter Bettung (3/4) kann hinzugefügt werden. Dies ist eine herausnehmbare Korkschicht (3 mm oder 5 mm), die während der Produktion unter die Leiste gelegt wird. Dadurch wird zusätzliches Volumen für die Schuheinlage geschaffen. Bitte beachten Sie, dass diese Schicht nur  $\frac{3}{4}$  der Leistenlänge beträgt, da wir sie nicht unter dem Vorfuß, unter der Zehenschutzkappe, platzieren dürfen.

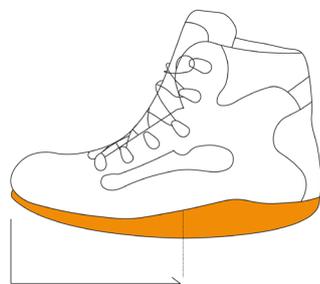

Tintenlöscherrolle

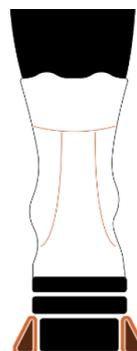

Ausgestellter Absatz